


Incidin® Liquid



Produs lichid gata preparat FĂRĂ ALDEHIDE pentru
dezinfecția RAPIDĂ a suprafețelor și aparaturii medicale

NOU:

- Dezinfecțant gata preparat
- Parfum plăcut
- Spectru larg de acțiune

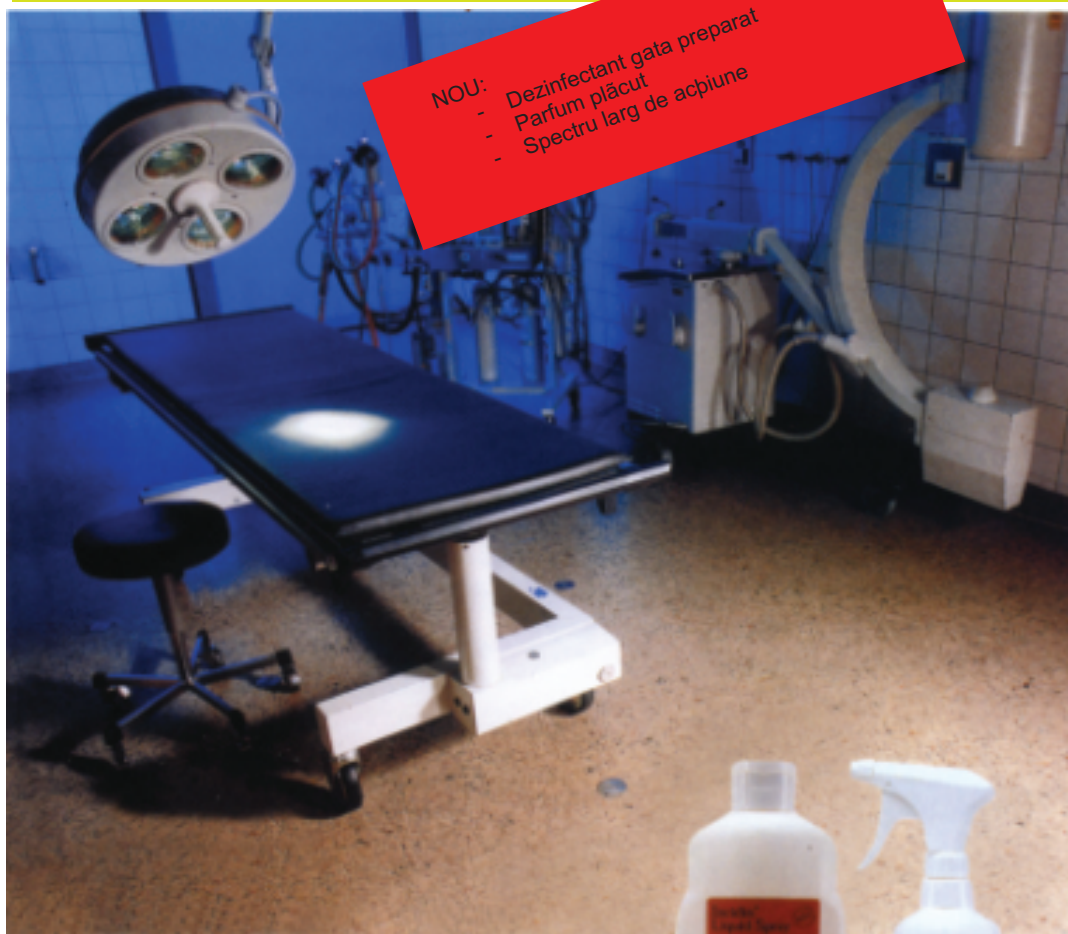

- Aviz sanitar nr. 77/EPI/19.07.2004
- Certificat de calitate ISO 9001/2000

Incidin® Liquid



Calitățile produsului

- spectru larg de acțiune: bacterii (incl. tuberculoză), fungi, virusuri: HBV/HCV și HIV.

- acțiune echilibrată și sinergică a substanțelor active

- parfum plăcut

- gata de utilizare

- utilizare prin sprayere

- certificare conform standardelor DGHM (ediția 12.07.91)

- expertizare completă și certificată a compatibilității cu diverse materiale

Avantajele utilizatorului

- grad înalt de dezinfecție a suprafețelor rezistente la alcoolii, inclusiv în zonele de risc.

- alcoolii determină o bună acoperire a suprafețelor de dezinfectat și uscare rapidă
- toxicitate redusă, foarte bine tolerat de către utilizator

- condiții de lucru plăcute

- aplicare facilă, efecte imediate

- posibilitatea unor aplicări multiple

- cea mai înaltă siguranța în utilizare

- utilizare pe metale, plastic și alte materiale rezistente la alcoolii

Dezinfectant lichid de utilizare pe bază de **Alcoolii**.

Prin timpul scurt de acțiune (5 minute) și eficacitatea crescută, asigură o dezinfecție primară rapidă, sigură și economică.

Indicat pentru dezinfecția:

• **obiectelor de inventar** din orice material (metal nichelat sau cromat, lemn lustruit sau vopsit, material plastic, sticlă, ceramică): mobilier de spital, brancarde, târgi, carucioare, scaune mobile, canapele de consultație și tratament, mese de operație, obiecte sanitare, diverse obiecte din saloanele de bolnavi, cabinete de consultație (uși, clanțe, aparate de telefon, stetoscoape, termometre, etc.).

• **aparaturii medicale** din blocuri operatorii, sali de naștere, de tratamente, ATI etc.

Compoziție: 100 gr. produs conțin:
32 gr. 2-propanol, 25 gr. 1-propanol, 0,375 gr amfotenside microbicide

Indicații de utilizare:	Mod de utilizare:
Dezinfecție rapidă prin sprayere a suprafețelor, aparaturii medicale și a obiectelor de inventar	- soluția de lucru este gata preparată - produsul nediluat se aplică prin sprayere de la aprox. 30 cm. (cca. 20 ml/mp); se lasă să se usuce - atenție la dispozitivele electrice, pericol de explozie (lăsați să se usuce)

Rezultatele testărilor microbiologice și virusologice		
	Concentrație %	Timp de acțiune
Dezinfecția suprafețelor în spitale și cabinete medicale (conform DGHM)	nediluat	15 min
Dezinfecția lemnului nature contaminat cu fungi (conform DGHM)	nediluat	15 min
Eficacitatea asupra HBV/HCV inclusiv HIV	nediluat	2,5 min
Eficacitatea asupra TBC	nediluat	5 min
"Testarea și evaluarea procedurilor de dezinfecție chimică", Beck, E.G. și colab., pag. 335-380 (1977)		



Forma de prezentare Incidin® Liquid		
Flacon plastic 1l	12 x 1 l	YLS 12

Expertize:

Produsul este testat complet: microbiologic, virusologic, toxicologic și ecologic. Dosarele de expertiză pot fi solicitate importatorului în România al acestui produs.